

Utilisation du dispositif HF pour malentendant (dans les salles non équipées).

Le dispositif se compose de trois parties:

- 1/ boucle
- 2/ un récepteur
- 3/ un micro



Pour utiliser le dispositif HF il faut:

- 1/ placer la boucle autour du cou
- 2/ enclencher le mini jack de la boucle dans le récepteur



- 3/ allumer le récepteur en tournant le bouton de volume
- 4/ enclencher son appareillage auditif sur la position compatible avec la boucle
- 5/ allumer le microphone à l'aide du bouton rouge



- 6/ vérifier que les boutons de canal soient sur la même position sur les 2 appareils



- 7/ régler le bouton de volume récepteur sur le niveau souhaité

